


超音波骨量測定器(ビーナスⅢ)



右足踵で計測
測定時間は約 23 秒！
タッチパネル式の簡単操作

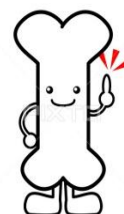

【測定方法】

- ①[計測]ボタンをタッチする。
- ②右足の計測部位(踵)両側とプローブキャップ両方にゼリーを塗る。
- ③計測部の底に踵を入れ、プローブを固定する。
- ④性別、年齢を入力する。
- ⑤[開始]ボタンをタッチする。
- ⑥終了と同時に結果が表示される。
- ⑦[印刷]ボタンでプリントする。

【印刷例】

